

# Tryon

La simplicidad de un clásico



# Tryon<sup>T</sup>

## La simplicidad de un clásico


TRYON® es el implante clásico de S.I.N. El sistema de implantes TRYON® Hexágono Externo se ha desarrollado a partir del concepto creado por el afamado profesor Per-Ingvar Brånemark.

Siguiendo la evolución de los implantes, TRYON® cuenta con la conexión Hexágono Externo y Cono morse, ambas con doble ataque ácido y una macrogeometría que asegura alta estabilidad primaria, efectividad y seguridad para sus cirugías.

Con más de 10 años en el mercado, TRYON® es un implante con amplia documentación científica y ha contribuido a lograr más de 3.000.000 de sonrisas en todo el mundo.



- › Conexiones de Hexágono Externo y Cono Morse.
- › Fabricado en Titanio Comercialmente Puro (TiCP) Grado 4, un metal ligero, resistente a la corrosión, al desgaste y a la fractura.

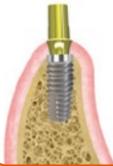

- › Compatible con la línea 3.6 FIT: permite el uso de Plataforma Switching para la línea HE, beneficiando a las áreas estéticas y anteriores, reduciendo el riesgo de pérdida ósea y microgaps.



- › Superficie tratada con doble ataque ácido: rugosidad ideal que proporciona una osteointegración segura.



- › Principalmente indicado para protocolos o prótesis múltiples.



- › Gran variedad de componentes protésicos.



- › Posee rosca externa con diámetro de cuerpo variado y plataforma con diámetros de 3,5; 3,75; 4,0; 4,1 y 5,0 mm: proporcionando una inserción rápida y menos traumática.
- › Colocación realizada a través del torque interno y sin ensamblador.



- › Excelente Costo-Beneficio.



- › Alta estabilidad en el tejido óseo.




- › Se pueden utilizar dos llaves para la colocación del implante (Llaves de contra ángulo y trinquete).

## KIT QUIRÚRGICO TRYON

### SIMPLICIDAD Y MÁXIMA FUNCIONALIDAD PARA SUS CIRUGÍAS

Facilidad para identificar el orden de fresado en el acto quirúrgico.

Conjunto para la colocación de implantes HE y CM de la línea TRYON®.

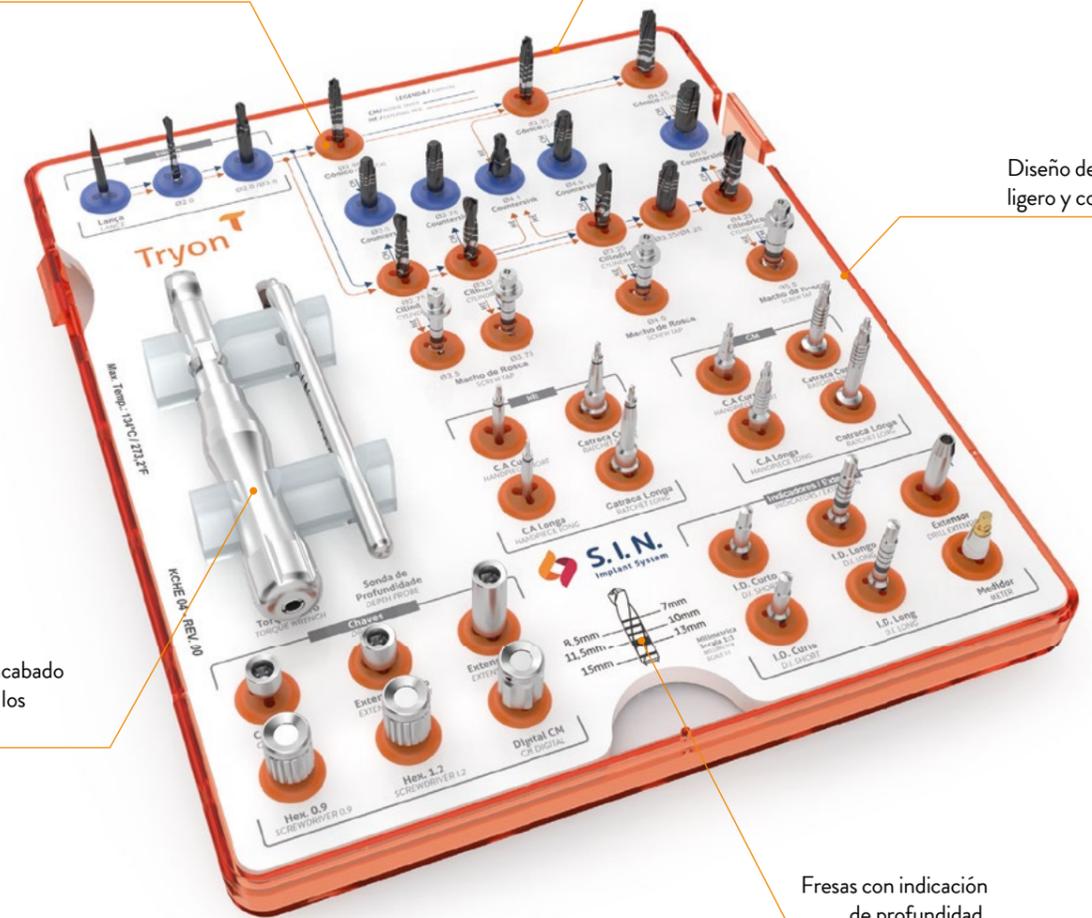

Diseño de bandeja más ligero y compacto.


Alto nivel de acabado y precisión de los instrumentos.

Fresas con indicación de profundidad.

CÓDIGO DEL PRODUCTO: KCHE


# Tryon

## Medidas técnicas TRYON® SAT CONO MORSE CILÍNDRICO

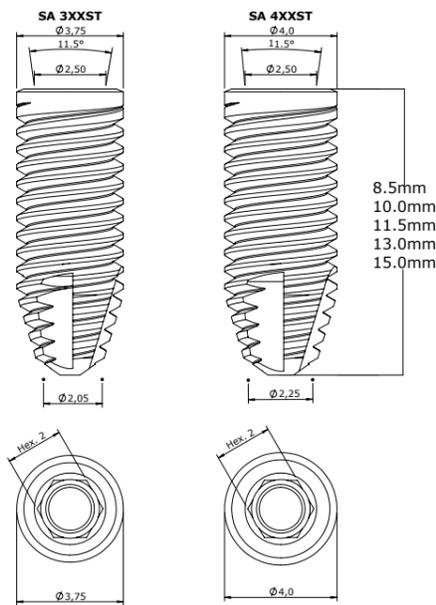


- Recomendado para huesos de Tipo III y IV.
- Se recomienda la colocación intraósea de 1,5 mm.
- Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- Rotación de las fresas iniciales: 1500 rpm.
- Rotación de las fresas cónicas: 800 rpm.
- Compatible con componentes Cono Morse 11,5°.

## Medidas técnicas TRYON® SC CONO MORSE CÓNICO

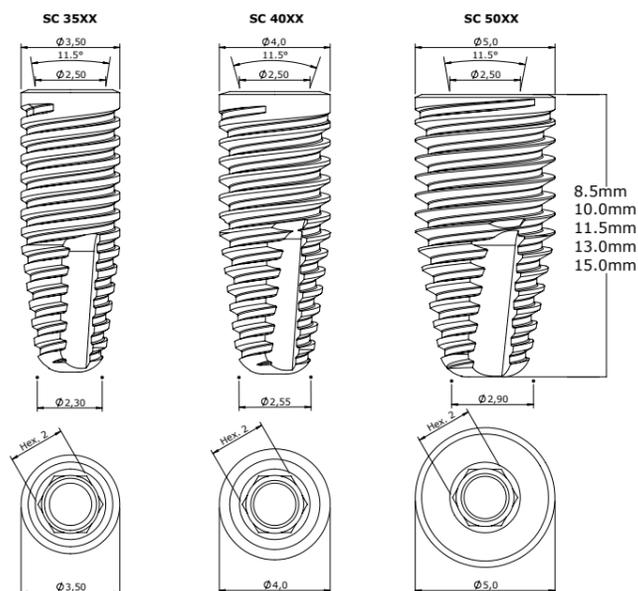

- Recomendado para huesos de Tipo III y IV.
- Se recomienda la colocación intraósea de 1,5 mm.
- Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- Fresas (Lanza y Helicoidal\*): velocidad 1500 rpm.
- Fresas (Piloto e Countersink): velocidad 800 rpm.
- Compatible con componentes Cono Morse 11,5°.


## Medidas técnicas TRYON® ST CONO MORSE CILÍNDRICO

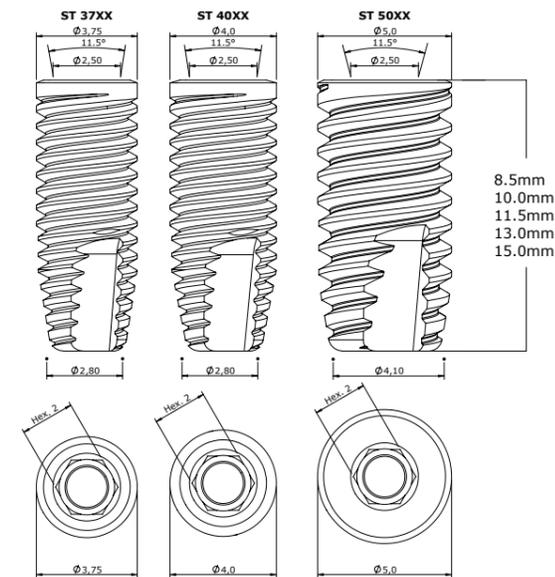

- Recomendado para huesos de Tipo I y II.
- Se recomienda la colocación intraósea de 1,5 mm.
- Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- Rotación de las fresas iniciales: 1500 rpm.
- Rotación de las fresas cónicas: 800 rpm.
- Fresas (Lanza y Helicoidal\*): velocidad de 1500 rpm.
- Compatible con componentes Cono Morse 11,5°.

\*A excepción de la fresa helicoidal FHTD 4215, la velocidad de fresado recomendada es de 800 rpm.


## Medidas técnicas TRYON® CY HEXÁGONO EXTERNO CILÍNDRICO

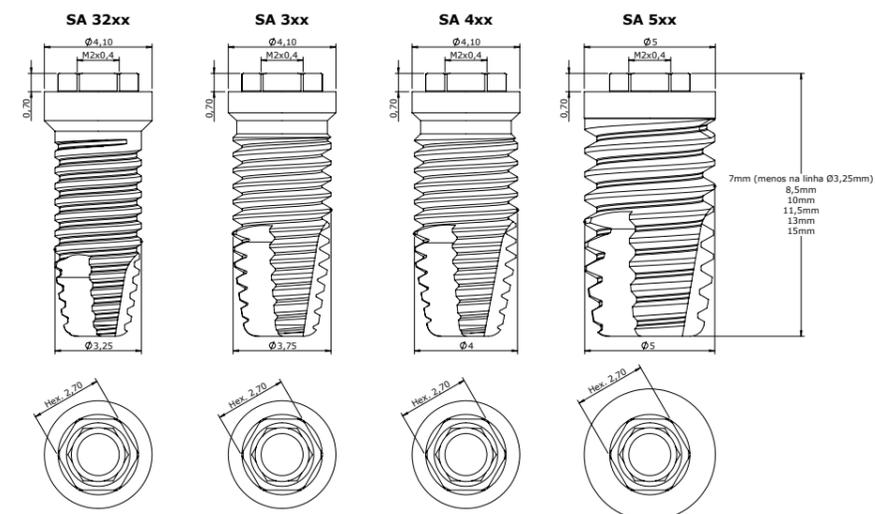

- Recomendado para huesos de Tipo I y II.
- Colocación a nivel del hueso.
- Rotación de inserción: 20 rpm.
- Torque máximo en cirugía: 80N.cm.
- Fresas (Lanza y Helicoidal\*): velocidad 1500 rpm.
- Fresas (Piloto y Countersink): velocidad 800 rpm.

\*A excepción de la fresa helicoidal FHTD 4215, la velocidad de fresado recomendada es de 800 rpm.

## Medidas técnicas TRYON® CO HEXÁGONO EXTERNO CÓNICO

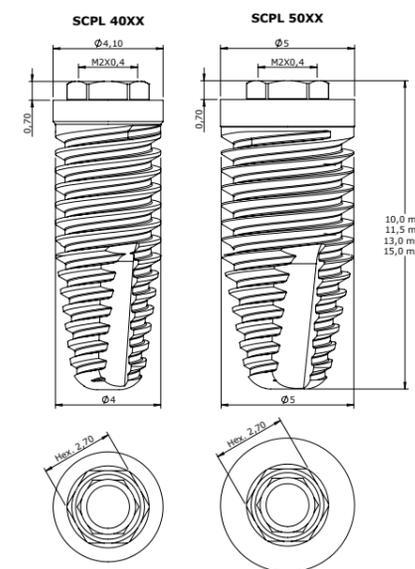

- Recomendado para huesos de Tipo III y IV.
- Colocación a nivel del hueso.
- Rotación de las fresas iniciales: 1500 rpm.
- Rotación de las fresas cónicas: 800 rpm.
- Torque máximo en cirugía: 80N.cm.



Conoce Implantat, el espacio educativo de S.I.N. Implant System

 [implantat.com.br](http://implantat.com.br)

0800 770 8290 (BR) | +351 214 120 336 (PT)

[www.sinimplantsystem.com](http://www.sinimplantsystem.com)

---

Visite nuestras redes sociales

 [fb.com/sinimplantsystem](https://fb.com/sinimplantsystem)

 [@sinimplantglobal](https://@sinimplantglobal)

 [S.I.N. Implant System](https://S.I.N. Implant System)