



# Epikut<sup>s</sup>


PTG PLUS

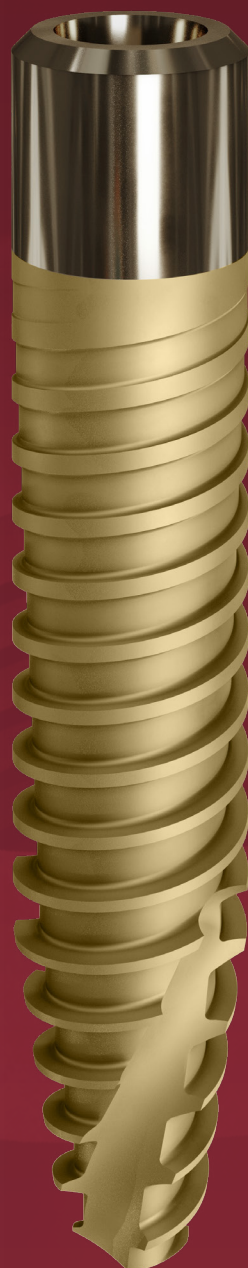

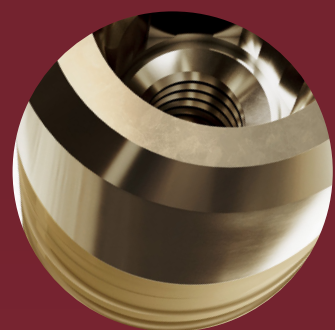


- **IDEAL PARA REABILITAÇÃO TOTAL DE MAXILAS ATRÓFICAS:**

Indicado para a reabilitação total de maxilas atróficas, onde a ancoragem no osso pterigoide é necessária para evitar procedimentos adicionais de enxerto.

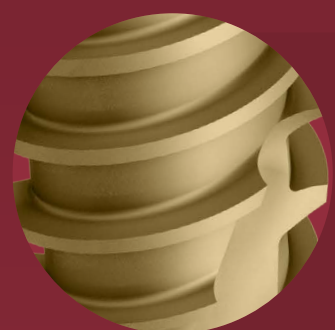


- **DESIGN AVANÇADO DE IMPLANTE PARA ESTABILIDADE APRIMORADA:**

Nossa abordagem inovadora apresenta um ápice estreito de 2,35 mm, permitindo uma preparação mínima (apenas duas fresas) na sutura pterigomaxilar, uma área com osso cortical espesso.

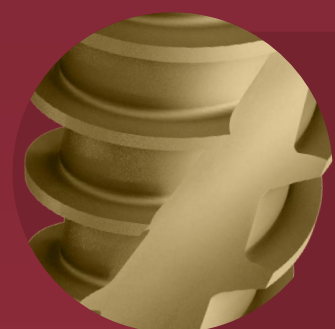

- **ROSCAS DE SUPORTE INVERTIDAS:**

As roscas de suporte invertidas garantem um alto torque nesta região, proporcionando uma estabilidade aprimorada mesmo em ossos de baixa densidade na região tuberosa.

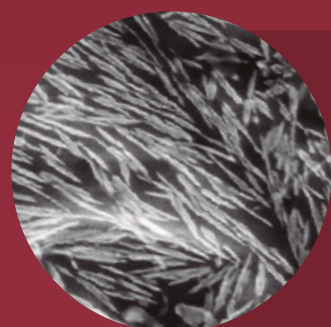


- **SUPERFÍCIE PLUS HAnano ®:**

Duplo Ataque Ácido na região da rosca e Superfície Hanano em todo o implante.




A nova definição do épico

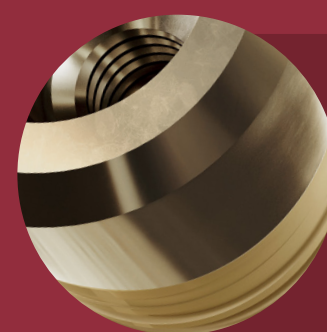


- **SUPERFÍCIE LISA E POLIDA NA ÁREA CERVICAL:**

Ideal para áreas de tecido mole e para reduzir a formação de biofilme, caso haja alguma exposição.

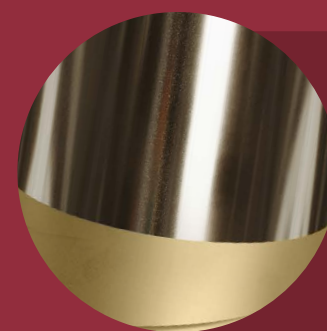

- **COLAR LISO COM SUPERFÍCIE HAnano ® DE 4 MM:**

Permite uma altura transmucosa de 1 a 2 mm com a inclinação necessária de até 45° para a técnica.

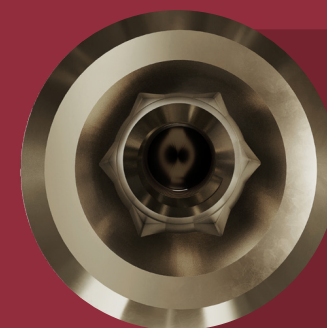

- **CONE MORSE 16°:**

Alta resistência mecânica e maior embricamento e adaptação dos componentes protéticos com a angulação de 16°.



# KIT COMPACTO, COMPLETO E VERSÁTIL



Osteótomos específicos para implantes PTG no mesmo kit.


Brocas Exclusivas Revestidas em Diamond-Like Carbon

Reduzem o aquecimento do osso; aumentam a durabilidade; oferecem alta potência de corte e um ângulo mais afiado.




Sonda de Profundidade para garantir a profundidade correta do local do implante.

## SEQUÊNCIA PROTÉTICA

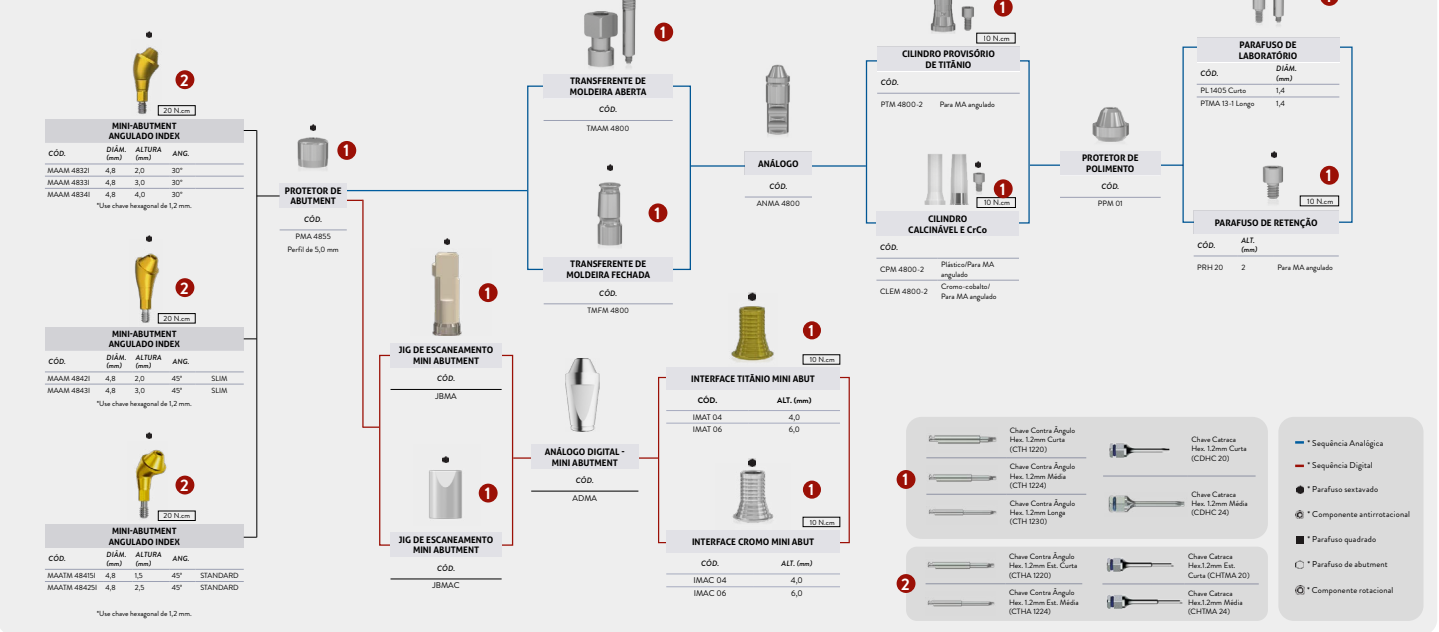

## MEDIDAS TÉCNICAS


	A	B	C	D	E
CÓDIGO	DIÂMETRO DE PLATAFORMA (MM)	DIÂMETRO CERVICAL (MM)	DIÂMETRO APICAL MÁXIMO (MM)	ALTURA DO COLAR POLIDO (MM)	ALTURA TOTAL (MM)
ILMP 3818EN	3,8	3,8	2,35	4,0	18,0
ILMP 3820EN					20,0
ILMP 3822EN					22,0
ILMP 3824EN					24,0
ILMP 4018EN	4,0	4,0	2,35		18,0
ILMP 4020EN					20,0
ILMP 4022EN					22,0
ILMP 4024EN					24,0
ILMP 4218EN	4,2	4,2	2,35		18,0
ILMP 4220EN					20,0
ILMP 4222EN					22,0
ILMP 4224EN					24,0
ILMP 4518EN	4,5	4,5	2,58		18,0
ILMP 4520EN					20,0
ILMP 4522EN					22,0
ILMP 4524EN					24,0

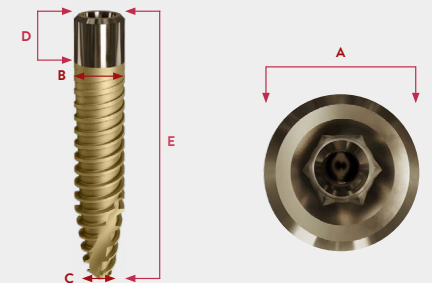

O kit conta com fresas extra-longas e as principais chaves para máxima eficiência: Chave de Contra Ângulo HEX 1,2 mm (CTH 1257), Chave de Contra Ângulo (CTMPTG 01) e Chave de Catraca (CCMPTG 01), ideais para uso com contra-ângulos e catracas.

Como opção, você também pode utilizar a Chave de Mão (CMPTG 01), vendida separadamente.

ESSA CHAVE É EXCLUSIVA PARA INSTALAÇÃO DO IMPLANTE EPIKUT S PTG PLUS, NÃO PODENDO SER UTILIZADA EM HIPÓTESE ALGUMA PARA INSTALAÇÃO DE OUTRO IMPLANTE OU OUTRA LINHA. TORQUE MÁXIMO 60 Nm.

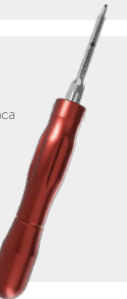


## SEQUÊNCIA DE FRESAGEM

- Etapa de fresagem obrigatória
- \* Etapa de fresagem obrigatória - subfresagem 7 mm
- \* Etapa de fresagem obrigatória - subfresagem 13 mm
- Etapa de fresagem opcional - subfresagem 7 mm
- Etapa de fresagem para ossos densos - cervical
- \* Etapa de fresagem para ossos densos - subfresagem 7 mm

Ø DIÂM. (mm)	FL 20P	FHE 25P * Substituto para OST 01	OST 01 * Substituto para FHE 25P	FC 33P	OST 02	OST 03	OST 04
3,8	•	•	•			•*	
4,0	•	•	•	•	•	•*	
4,2	•	•	•	•	•	•*	•
4,5	•	•	•	•	•	•*	•*

Observação: A fresa FHE 25P substitui o uso do osteótomo OST1 e vice-versa. Ou seja, quando um for utilizado, não é necessário utilizar o outro.

## KIT CIRÚRGICO

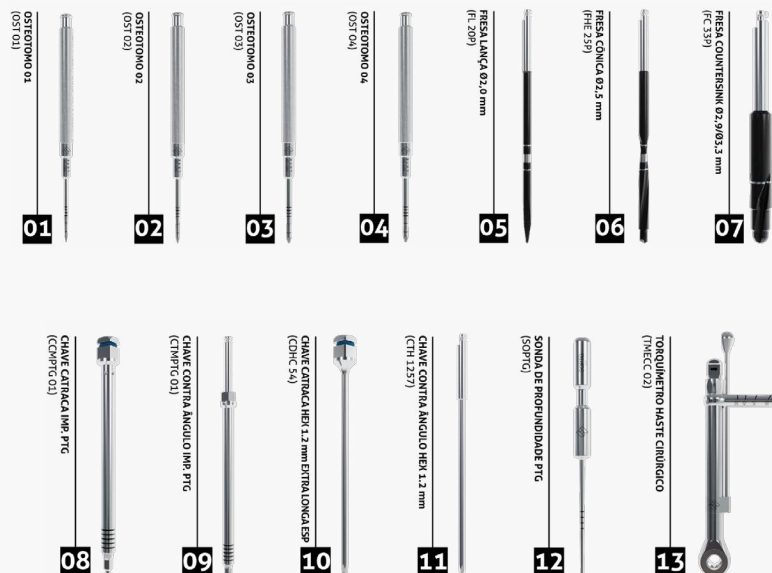



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.



[implantat.com.br](https://implantat.com.br)

0800 770 8290(BR)  
[www.sinimplantsystem.com.br](https://www.sinimplantsystem.com.br)

---

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinbrasiloficial](https://www.instagram.com/sinbrasiloficial)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin\\_implant](https://www.tiktok.com/sin_implant)