


Lite

SEQUÊNCIA DE FRESAGEM
HEXÁGONO EXTERNO

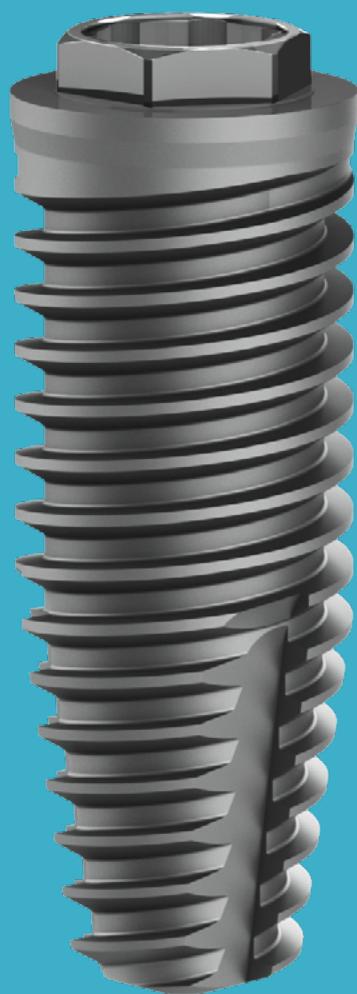

S.I.N.



Para garantir o melhor desempenho do Implante Lite Cone Morse 11,5°, utilize o kit exclusivo **KCLHE 01**, desenvolvido especialmente para essa conexão.

Eficiência desde a perfuração.

Siga o protocolo cirúrgico recomendado para resultados previsíveis:

- **Indicado para carga imediata (>45N.cm) ou carga tardia (reabertura com 4 meses em mandíbula e 6 meses em maxila).**
- **Para melhores resultados as fresas deverão ser substituídas após 20 perfurações em ossos de alta densidade; 30 perfurações em ossos de baixa densidade.**

Confira ao lado o passo a passo da sequência de fresagem e realize suas cirurgias com mais segurança, controle e previsibilidade.

Instalação a nível ósseo

Rotação de fresa inicial: 1200 rpm

Rotação das demais fresas: 800 rpm

Rotação de fresa Countersink: 800 rpm

Rotação de inserção do implante: 20 a 40 rpm

Torque máximo: 80 N.cm

Carga imediata*: torque recomentado de 45 a 80 N.cm

*Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional

SEQUÊNCIA DE FRESAS LITE HEXÁGONO EXTERNO

PARA OSSOS TIPO MACIO

Sequência de fresagem utilizada para o osso tipo III e IV.

Ø DIÂM. (mm)	1.200 RPM								800 RPM				
	FLSLT 20 Ø2.0	FHSLT 20 Ø2.0	FRSLT 32S Ø3.25	FRSLT 35S Ø3.5	FRSLT 38S Ø3.8	FRSLT 40S Ø4.0	FRSLT 45S Ø4.5	FRSLT 50S Ø5.0	FCLT 35 Ø3.5	FCLT 38 Ø3.8	FCLT 40 Ø4.0	FCLT 45 Ø4.5	FCLT 50 Ø5.0
3,25	•	•	•						•				
3,5	•	•	•	•					•				
3,75	•	•	•	•	•							•	
4,0	•	•	•	•	•	•						•	
4,5	•	•	•	•	•	•	•					•	
5,0	•	•	•	•	•	•	•	•					•

• Uso opcional

PARA OSSOS TIPO DURO

Sequência de fresagem utilizada para o osso tipo I e II.

Ø DIÂM. (mm)	1.200 RPM								800 RPM				
	FLSLT 20 Ø2.0	FHSLT 20 Ø2.0	FRSLT 32H Ø3.25	FRSLT 35H Ø3.5	FRSLT 38H Ø3.8	FRSLT 40H Ø4.0	FRSLT 45H Ø4.5	FRSLT 50H Ø5.0	FCLT 35 Ø3.5	FCLT 38 Ø3.8	FCLT 40 Ø4.0	FCLT 45 Ø4.5	FCLT 50 Ø5.0
3,25	•	•	•										
3,5	•	•	•	•									
3,75	•	•	•	•	•							•	
4,0	•	•	•	•	•	•						•	
4,5	•	•	•	•	•	•	•					•	
5,0	•	•	•	•	•	•	•	•					•

• Uso opcional



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.



0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinimplantsystem](https://www.instagram.com/sinimplantsystem)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)