



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.

 implantat.com.br

0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](#)



[@sinbrasiloficial](#)



[/sinimplantsystem](#)



[S.I.N. Implant System](#)



[/sin_implant](#)

Lite

HEXÁGONO EXTERNO

- Conexão Hexágono Externo Padrão Branemark, qualidade comprovada e sua simplicidade unida com a tecnologia mais avançada do mercado.
- Duplo Ataque Ácido, até a região da cervical, um tratamento que proporciona uma superfície ativa auxiliando na osseointegração.
- Pode ser aplicado em uma ampla variedade de casos, desde que os protocolos clínicos e o sistema de fresagem específicos sejam rigorosamente seguidos indicado para carga imediata (>45N.cm) ou carga tardia (reabertura com 4 meses em mandíbula e 6 meses em maxila).
- Conexão hexalobular: chave não trava e suporta maior torque, não deformando a conexão.
- Possibilita a técnica de Platform Switching.


INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- 3,25 mm – Incisivos laterais superiores, incisivos inferiores
- 3,5 mm – Incisivos laterais superiores, incisivos inferiores
- 3,75 mm – Incisivos centrais superiores, caninos e pré-molares
- 4,0 mm – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- 4,5 mm – Incisivos centrais superiores, caninos, pré-molares e molares
- 5,0 mm – Molares

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Instalação a nível ósseo
- Rotação de fresa inicial: 1200 rpm
- Rotação de demais fresas: 800 rpm
- Rotação de fresa Countersink: 800 rpm
- Rotação de inserção do implante: 20 a 40 rpm
- Torque máximo: 80 N.cm
- Carga imediata*: torque recomentado de 45 a 80 N.cm
- Acompanha Tapa Implante.

* Contraindicação relativa em pacientes com problemas sistêmicos ou locais e a critério do profissional
* Verifique a disponibilidade dos produtos na sua região.

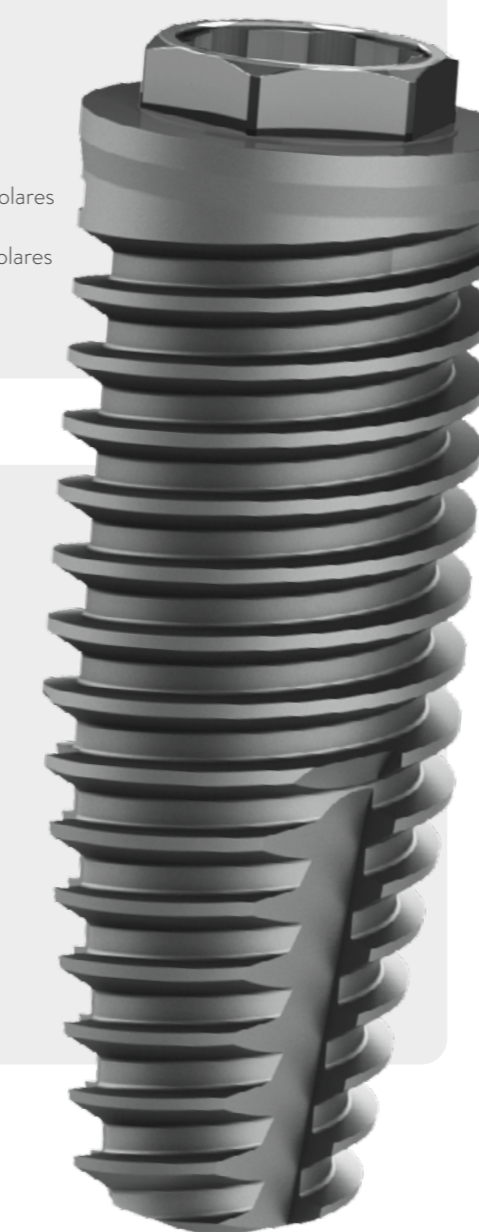

Lite

QUADRO PROTÉTICO

HE



