COMPONENTI

Moncone Provvisorio



Il Moncone Provvisorio è destinato ad essere utilizzato nell'uomo per la realizzazione di protesi dentarie, contribuendo al trattamento riabilitativo della funzione masticatoria.





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Moncone Provvisorio è un componente protesico, costituito da un moncone cilindrico in titanio di grado V con perforazione interna per accedere alla vite di fissaggio della protesi. Sono messi a disposizione del professionista in forma non sterile. Incluso nella vite in titanio di grado V.

INDICAZIONI PER L'USO

È indicato per la preparazione di protesi provvisorie su impianti o intermediari protesici, da fissare tramite vite. Questo prodotto consente una soluzione protesica temporanea; il periodo massimo indicato per l'uso è di 06 mesi. Può avere due opzioni di montaggio: rotazionale (senza esagono) - indicato per protesi multiple e antirotazionale (con esagono) - indicato per protesi unitarie.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Ha lo scopo di, insieme all'impianto, trasmettere la forza di masticazione alla tavola ossea, in cui vengono impiantati chirurgicamente. Gli Moncone Provvisorio si basano sui principi meccanici di assemblaggio del sistema di trasmissione del carico.

MODO D'USO

Gli Moncone Provvisorio e vite devono essere sterilizzati prima dell'uso secondo le linee guida contenute in queste istruzioni per l'uso.

- Direttamente in bocca o in un modello con un analogo, collegare la componente secondaria provvisoria e regolare l'altezza del componente in base allo spazio interocclusale disponibile;
- Costruire o cementare il restauro temporaneo con cura per mantenere il foro per l'accesso alla vite;
- Apportare le modifiche necessarie come lucidatura, regolazioni occlusali;
- 4. Collegare* il gruppo del restauro provvisorio all'abutment provvisorio o alla protesi intermedia sulla piattaforma implantare:
- Chiudere temporaneamente l'accesso alla vite con teflon e materiale di restauro.

*La coppia consigliata per l'installazione di abutment temporanei è di 20N.cm per impianti a esagono esterno, esagono interno e cono morse e 10N.cm per intermedi protesici.



ATTENZIONE

Il Moncone Provvisorio sono indicati per la realizzazione di protesi dentarie su impianti, hanno la funzione di fungere da intermediario per la connessione tra impianto osteointegrato e protesi dentale.

PRECAUZIONI

Considerare lo stato generale di salute del paziente, deve sottoporsi a un'analisi clinica approfondita. La mancata esecuzione della valutazione pre-chirurgica può comportare l'impossibilità di trovare malattie preesistenti. I pazienti con fattori locali o sistemici che possono interferire con i processi di guarigione dei tessuti molli dovrebbero ricevere un'attenzione speciale.



Sterilizzazione di Moncone Provvisorio è garantito solo se l'imballaggio primario (blister) non è danneggiato. Non utilizzare il prodotto se l'imballaggio è rotto. Aprire la confezione solo al momento dell'intervento e utilizzare immediatamente il prodotto. Maneggiare il materiale solo in un campo sterile. Tutto il materiale utilizzato nella procedura deve essere sterile. Durante la procedura chirurgica e protesica utilizzare solo impianti, componenti e strumenti specificati da S.I.N., hanno dimensioni e tolleranze specifiche per ciascun sistema di impianto garantendo la longevità del prodotto. Componenti di altre marche o adattati per modelli di impianti possono ridurre la durata del sistema causando danni irreversibili. Se um diâmetro correto não for usado, poderá ocorrer irritação do tecido mole. Il piattaforma Moncone Provvisorio che si adatta all'impianto non deve essere modificato in alcun modo. Il professionista deve assicurarsi che il prodotto non sia aspirato dal paziente. È responsabilità del professionista utilizzare S.I.N. in conformità con le istruzioni per l'uso, oltre a determinare se si adatta alla situazione individuale di ciascun paziente. Se non viene utilizzato un diametro corretto, può verificarsi irritazione dei tessuti molli. Il paziente deve essere informato di tutte le possibili complicanze chirurgiche, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni avverse. Tutta la documentazione che accompagna il prodotto deve anche essere messa a disposizione del cliente. Il professionista deve informare il paziente sulla corretta forma di pulizia, sulla necessità di un monitoraggio regolare, evitando stress fisici e meccanici e non sottoponendo il prodotto a sforzi inappropriati.

RACCOMANDAZIONI

Per il posizionamento di Moncone Provvisorio si raccomanda al professionista di seguire un corso di specializzazione nell'area e preparare un piano di esecuzione protesica. Una pianificazione inadeguata e/o la mancanza di aggiustamento occlusale possono compromettere le prestazioni del set di impianti/protesi con consequente fallimento del sistema, come perdita o frattura dell'impianto, allentamento o frattura delle viti protesiche. Il diametro e l'angolazione dell'impianto, nonché l'altezza gengivale, devono essere presi in considerazione quando si sceglie il Moncone Provvisorio da essere usato. S.I.N. sconsiglia di installare l'impianto in pazienti con igiene orale inadeguata, paziente non collaborativo e non motivato, con abuso di droghe o alcol, psicosi, dipendenza chimica, disturbi funzionali prolungati che resistono a qualsiasi trattamento farmacologico,

xerostomia, sistema immunitario basso, malattie che richiedono l'uso regolare di steroidi, malattie endocrinologiche, allergie ai farmaci, diabete mellito, farmaci anticoagulanti/diatesi emorragica, bruxismo, altre abitudini parafunzionali, abuso di tabacco, installazione nei bambini e nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento.

CONTROINDICAZIONE

L'uso di Moncone Provvisorio è controindicato in caso di infiammazione parodontale cronica, pazienti non preparati a sottoporsi a riabilitazione orale, abitudini parafunzionali inadeguate, ad esempio bruxismo, occlusione/problemi articolari non trattabili, infezione intraorale attiva e in caso di carico immediato, stabilità primaria dell'impianto inadeguata. È inoltre controindicato l'uso del componenti come protesi permanente.

EFFETTI AVVERSI

Seguire le raccomandazioni di installazione per il corretto funzionamento del prodotto, in caso contrario il risultato finale può essere compromesso generando, perdita o frattura del pezzo. Il prodotto può causare effetti collaterali transitori a causa della compressione dei tessuti perimplantari come lieve sanguinamento, edema, dolore, disagio o persino infezione in caso di rottura della barriera asettica.

AVVERTENZE

Poiché si tratta di protesi provvisorie realizzate generalmente in resina acrilica, il tempo di utilizzo delle componenti secondarie provvisorie dovrebbe essere al massimo 06 mesi dopo l'installazione in bocca. Compatibile solo con S.I.N..

TRACCIABILITÀ

Tutti i prodotti S.I.N. - Implant System hanno lotti sequenziali che ne consentono la tracciabilità, favorendo così una maggiore sicurezza per il professionista abilitato alla procedura. Attraverso questo numero di lotto è possibile conoscere l'intera storia del prodotto, dal processo di produzione al momento della distribuzione.



CONSERVAZIONE

Le Moncone Provvisorio devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura massima di 35°C e al riparo dalle radiazioni solari dirette.

MOVIMENTAZIONE

Il Moncone Provvisorio sono prodotti sterili che devono essere manipolati solo in un campo sterile da professionisti adeguatamente formati e in uniformi appropriate al momento della procedura chirurgica.

SMALTIMENTO DEI MATERIALI

Lo smaltimento dei materiali deve essere effettuato in conformità con le vigenti normative ospedaliere e le leggi locali.

TRASPORTO

Le Moncone Provvisorio devono essere trasportate in modo appropriato, per evitare cadute e conservate a una temperatura massima di 35°C, al riparo dal calore e dall'umidità. Il trasporto deve essere effettuato nella sua confezione originale.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Risonanza magnetica (MRI): La sicurezza e la compatibilità dei prodotti S.I.N. con l'ambiente MRI non sono state valutate. Non sono stati testati il riscaldamento, lo spostamento o la distorsione subiti dagli impianti dentali e dai componenti S.I.N. nell'ambiente della risonanza magnetica. La sicurezza di questi prodotti nell'ambiente della risonanza magnetica è sconosciuta. La risonanza magnetica di un paziente con questo dispositivo può provocare Prodotto paziente. monouso. Ricondizionamento vietato. Prodotto per uso dentale esclusivo. Consultare le condizioni di sterilizzazione contenute in queste istruzioni per l'uso. In caso di incidente causato dal prodotto, il professionista deve informare immediatamente il produttore. Se hai bisogno di una versione stampata di gueste istruzioni per l'uso, gratuitamente, ti preghiamo di richiederla via e-mail a sin@sinimplante.com.br o chiamare lo 0800 770 8290 e la riceverai entro 7 giorni di calendario.

STERILIZZAZIONE

Il prodotto fornito non è sterile e deve essere sterilizzato prima dell'uso.

- Utilizzare imballaggi compatibili con il processo di sterilizzazione a vapore;
- Sterilizzare a vapore in cicli di 121 ° C a 1 ATM di pressione per 30 minuti o a 134 ° C a 2 ATM di pressione per 20 minuti. Lasciare asciugare per 30 minuti:
- Collocare sempre il prodotto in autoclave su una superficie piana e lontano dalle pareti dell'apparecchio;
- 4. Non sovrapporre mai oggetti o altri prodotti.

RACCOMANDAZIONI

- a. Sterilizzare il giorno prima o il giorno della procedura;
- La sterilizzazione chimica non è raccomandata, poiché alcuni prodotti possono causare danni al prodotto:
- Non utilizzare una temperatura superiore a 60°C per asciugare i prodotti;
- d. Non utilizzare mai forni a calore secco per sterilizzare il S.I.N.



\wedge			
NON	NÃO ESTÉRIL	NON-ESTERILE	NON STERILE
(2)	NÃO REUTILIZAR	DO NOT REUSE	NON RIUTILIZZARE
[]i	CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE USO	CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
C€	MARCAÇÃO CE	CE MARK	MARCATURA CE
Ť	MANTENHA SECO	KEEP DRY	MANTENERE ASCIUTTO
豢	MANTENHA AO ABRIGO DO SOL	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT	TENERE LONTANO DALLA LUCE DEL SOLE
	NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED	NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È ROTTA
STERMIZE	NÃO REESTERILIZE	DO NOT RESTERILIZE	NON RISTERILIZZARE
\triangle	ATENÇÃO	CAUTION	ATTENZIONE
EC REP	REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA	AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITÀ EUROPEA
35°C	LIMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA	UPPER LIMIT OF TEMPERATURE	LIMITE SUPERIORE DI TEMPERATURA
Rx only	ATENÇÃO: A LEI FEDERAL (EUA) LIMITA A VENDA DESTE DISPOSITIVO POR OU POR ORDEM DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO.	(USA) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON	ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE (USA) LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO A UN PROFESSIONISTA SANITARIO AUTORIZZATO O SU SUO ORDINE.
	FABRICANTE	MANUFACTURE	PRODUTTORE
M	DATA DE FABRICAÇÃO	DATE OF MANUFACTURE	DATA DI PRODUZIONE
REF	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	REFERENCE CODE	CODICE DI RIFERIMENTO
MD	DISPOSITIVO MÉDICO	MEDICAL DEVICE	DISPOSITIVO MEDICO
UDI	IDENTIFICADOR ÚNICO DO DISPOSITIVO	UNIQUE DEVICE IDENTIFIER	IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL DISPOSITIVO
	IMPORTADOR	IMPORTER	IMPORTATORE
	DISTRIBUIDOR	DISTRIBUTOR	DISTRIBUTORE
BRA	PAÍS DE FABRICAÇÃO	COUNTRY OF MANUFACTURE	PAESE DI PRODUZIONE
LOT	LOTE	BATCH CODE	LOTTO
Δ	EMBALAGEM RECICLÁVEL	RECYCABLE PACKAGING	IMBALLAGGI RICICLABILI



SVILUPPATO E FABBRICATO DA: S.I.N. Sistema de Implante Nacional S/A

CNPJ: 04.298.106/0001-74
Rua Soldado Ocimar Guimarães da S

Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, 2445 - Vila Rio Branco CEP: 03348-060 - São Paulo - SP - Brasil

SERVIZI AL PROFESSIONISTA

0800 770 8290 +55 (11) 2169-3000

www.sinimplantsystem.com e-mail: sin@sinimplante.com.br



OBELIS S.A.

Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium



RESPONSABILE TECNICO:

Alessio Di Risio

CREA-SP: 5061207169

PRODOTTO: Moncone Provvisorio

REGISTRAZIONE ANVISA: 80108910027