



Descubre Implantat, el streaming educativo de S.I.N. Implant System
[implantat.global](https://www.implantat.global)

www.sinimplantsystem.com

Visit our social networks:



@sinimplantglobal



@sinimplantglobal



S.I.N. Implant System



Epikut^S

CONO MORSE 16°


- Indicado para todo tipo de huesos, principalmente para huesos de baja densidad, alveolo post-extracción y carga inmediata y/o tardía.
- Puede utilizarse para todas las demás situaciones clínicas, siempre que se sigan los pasos clínicos sugeridos en su sistema de fresado.
- Alta hidrofiliya en EPIKUT PLUS: la capa ultrafina de hidroxiapatita aumenta la actividad de las proteínas implicadas en el proceso de osteointegración.
- La macrogeometría exclusiva garantiza precisión y agilidad en el momento de la cirugía.
- Angulación interna: 16°.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- 3.5 mm - Incisivos centrales y laterales
- 3.8 mm - Incisivos centrales superiores, caninos y premolares
- 4.0 mm - Incisivos centrales superiores, caninos, premolares y molares
- 4.5 mm - Incisivos centrales superiores, caninos, premolares y molares
- 5.0 mm - Molares



- Instalación de infra-ósea de 1.5 mm
- Rotación inicial de la fresa: 1200 rpm
- Rotación de la fresa de 2.7 mm a 4.8 mm: 800 rpm
- Rotación de inserción: 20 a 40 rpm
- Par de torsión máximo: 80 N.cm
- Carga inmediata*: par de torsión recomendado de 45 a 80 N.cm
- Viene con cubeta de implante de 2.0 mm

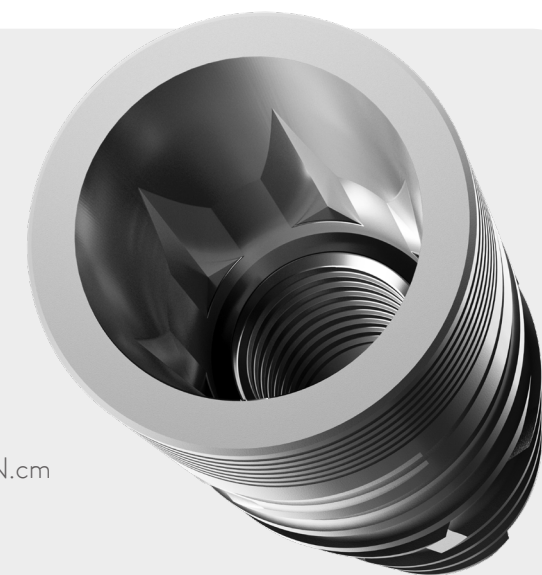

* Contraindicación relativa en pacientes con problemas sistémicos o locales y a la discreción del profesional
* Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

CUADRO PROTÉSICO Epikut^{16°}



 *Tornillo de pilar
 *Tornillo cuadrado
 *Tornillo hexagonal

 *Componente rotacional
 *Componente antirrotacional

-  *Tornillo de pilar
  *Tornillo cuadrado
  *Tornillo hexagonal
- *Componente rotacional
 *Componente antirrotacional

 *Tornillo de pilar
  *Tornillo cuadrado
  *Tornillo hexagonal

 *Componente rotacional
 *Componente antirrotacional