




Descubra Implantat, el streaming educativo de S.I.N. Implant System.
[implantat.global](https://www.implantat.global)

www.sinimplantsystem.com

Visite nuestras redes sociales

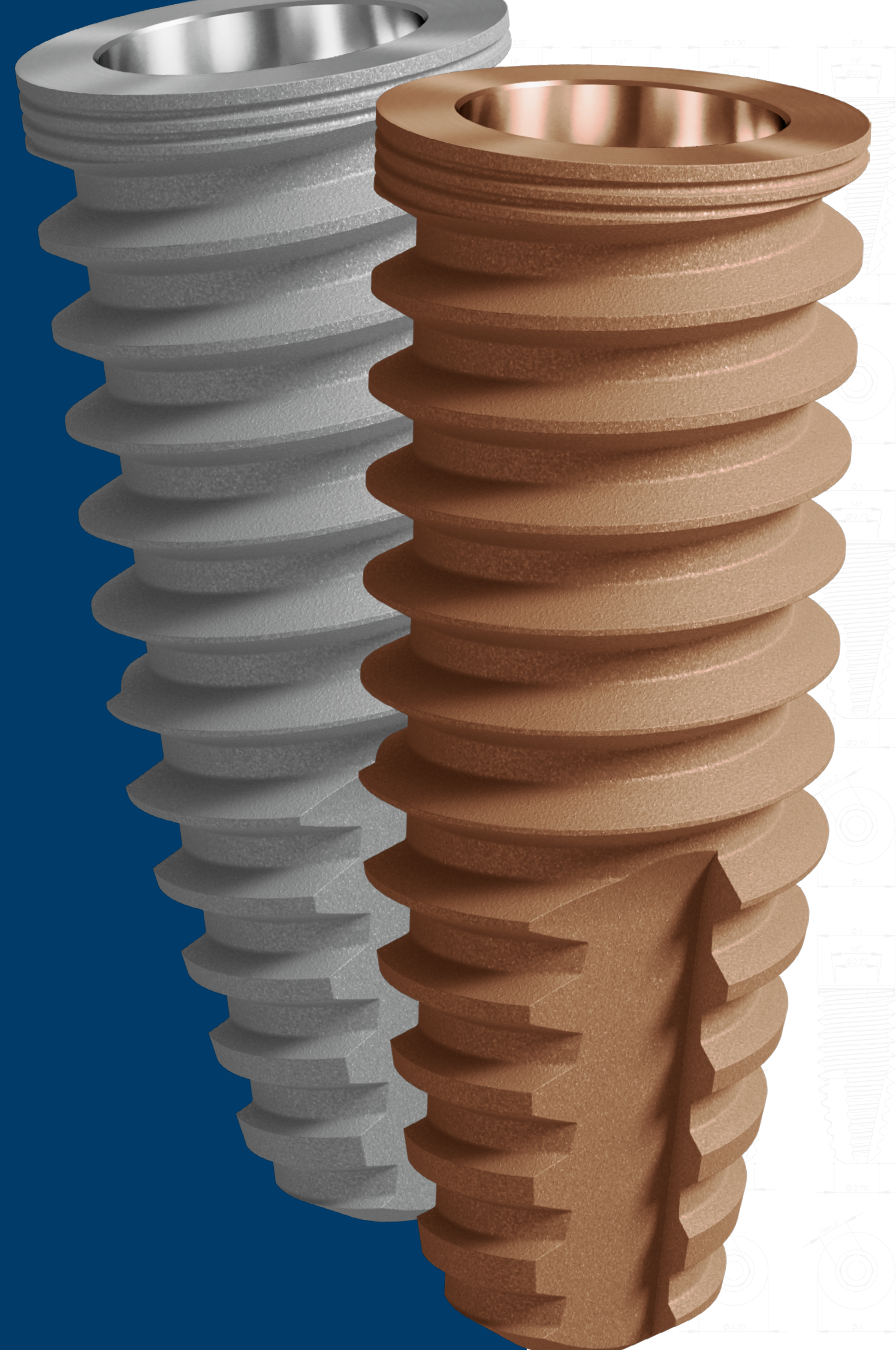

Strong sw 16°

- Indicado para rehabilitación con carga inmediata o tardía y para implantes únicos o múltiples.
- También se recomienda para pequeños espacios mesiodistales (incisivos inferiores y laterales superiores).
- Indicado para todos los tipos de hueso, incluyendo post extracción.
- Implantes unitarios o múltiples.
- 3 opciones de clave para instalación: contra-ángulo, trinquete y llave digital.
- Para instalación al nivel óseo es necesario usar la tapa TIMC.


INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- **3.5 mm** – Incisivos centrales y laterales.
- **3.8 mm** – Centrales y laterales superiores, caninos y premolares.
- **4.5 mm** – Premolares y Molares.
- **5.0 mm** – Molares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Angulación interna de 16°.
- Rotación de las fresas iniciales: 1.500 rpm.
- Rotación de las fresas: 3.5 a 5.0 mm: 800 rpm.
- Rotación de los machos de rosca: 25 rpm*.
- Rotación de inserción: 20 a 40 rpm.
- Carga inmediata: torque recomendado de 45 a 80 N.cm**.
- Carga tardía: hasta 45 Ncm.
- Viene con cubeta de implante.

* En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.
** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.

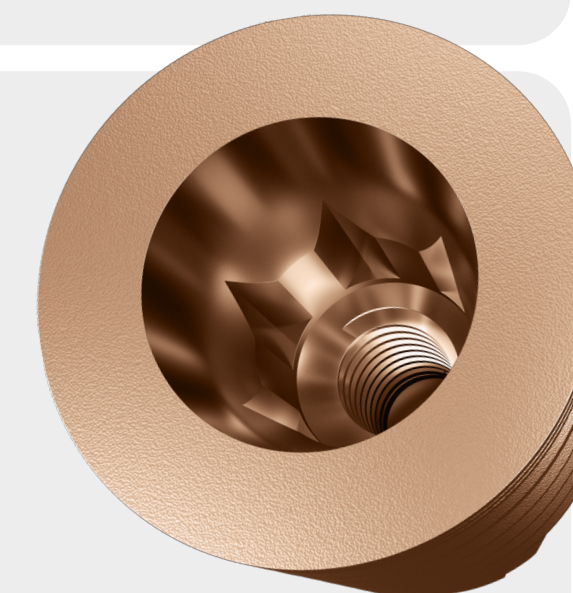

CUADRO PROTÉSICO
Strong sw
16°



[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)