



Descubra Implantat, el streaming educativo de S.I.N. Implant System.
[implantat.global](https://www.implantat.global)

www.sinimplantsystem.com

Visite nuestras redes sociales



Strong sw HI

- Indicado para rehabilitación con carga inmediata o tardía y para implantes únicos o múltiples.
- Indicado para todos los tipos de hueso, incluyendo post extracción.
- 3 opciones de llave para instalación: contra-ángulo, trinquete y llave digital.

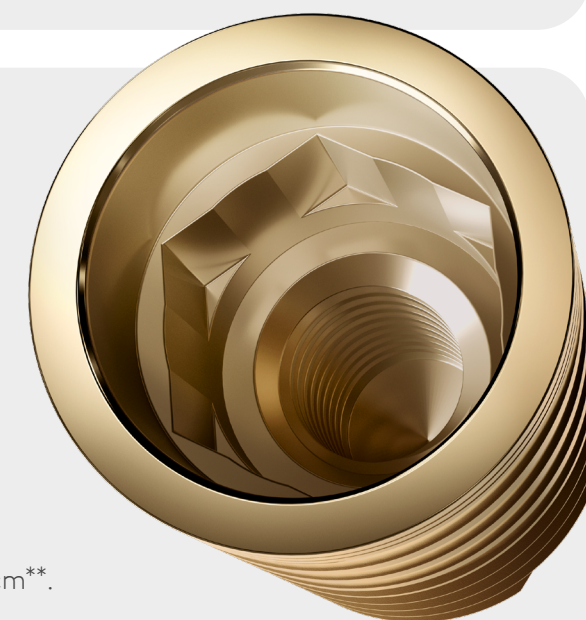
INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- **3.8 mm** – Incisivos centrales, laterales, caninos y premolares.
- **4.5 mm** – Premolares y Molares.
- **5.0 mm** – Premolares y Molares.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Rotación de las fresas iniciales: 1.500 rpm.
- Rotación de las fresas: 3.5 a 5.0 mm: 800 rpm.
- Rotación de los machos de rosca: 25 rpm*.
- Rotación de inserción: 20 a 40 rpm.
- Carga inmediata: torque recomendado de 45 a 80 N.cm**.
- Carga tardía: hasta 45 Ncm.
- Viene con cubeta de implante.

*En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.
** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.



CUADRO PROTÉSICO
Strong sw
HI



CUADRO PROTÉSICO

Strong sw

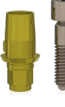
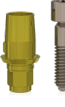
HI

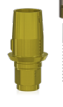
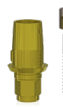
* Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

- *Tornillo de pilar
- *Tornillo cuadrado
- *Tornillo hexagonal
- ⊗

*Componente rotacional
- ⊙

*Componente antirrotacional

TIPOS DE PRÓTESIS	SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE	
	CEMENTADA	
	Unitaria	
CICATRIZADORES	ANALÓGICO	DIGITAL
	 CICATRIZADOR 10 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) CIS 3842 4,0 2,0 CIS 3844 4,0 4,0 CIS 3846 4,0 6,0 CIS 4552 5,0 2,0 CIS 4554 5,0 4,0 CIS 4556 5,0 6,0	 CICATRIZADOR DE PEEK 10 N.cm CÓD. DIÁM. PLAT (mm) DIÁM. PERFIL (mm) ALT. (mm) CPH 3805 3,8 5,0 5,0 CPH 3808 3,8 8,0 5,0 CPH 4508 4,5 8,0 5,0
INTERMEDARIO PROTÉSICO	NO APLICA	NO APLICA
TRANSFER	 TRANSFER DE CUBETA ABIERTA CÓD. DIÁM. (mm) TIHIS 38 3,8 TMAIS 45 4,5  TRANSFER DE CUBETA CERRADA CÓD. DIÁM. (mm) TIPI3 38 3,8 TMFI3 45 4,5	 JIG DE ESCANEO - HI CÓD. JBHI 38C  JIG DE ESCANEO - HI CÓD. JBHI 38
PROVISIONALIZACIÓN	 CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO 20 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) CPTS 386-Q 3,8 CPTS 456-Q 4,5	 INTERFAZ TITANIO HI SIRONA 20 N.cm PLATAFORMA S.I.N. BIBLIOTECA SIRONA IHI 3804 FX 3.8 - FX 4.5 * Compatible con SW HI  INTERFAZ CROMO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHC 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHC 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0  INTERFAZ TITANIO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHI 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHI 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0
CONFECCIÓN DE MODELO	 ANÁLOGO CÓD. ANS 3800 ANS 4500	 ANÁLOGO DIGITAL - HI CÓD. ADHI 38
PRÓTESIS FINAL	 PILAR ANGULADO CEMENTADO 17° 20 N.cm CÓD. PLAT. (mm) ALT. (mm) AIAS 3842-Q 3,8 2,0 AIAS 3844-Q 3,8 4,0 AIAS 4562-Q 4,5 2,0 AIAS 4564-Q 4,5 4,0  PILAR CEMENTADO RECTO 20 N.cm CÓD. PLAT. (mm) ALT. (mm) AIS 3801-Q 3,8 1,0 AIS 3802-Q 3,8 2,0 AIS 3803-Q 3,8 3,0 AIS 3804-Q 3,8 4,0 AIS 4501-Q 4,5 1,0 AIS 4502-Q 4,5 2,0 AIS 4503-Q 4,5 3,0 AIS 4504-Q 4,5 4,0	 INTERFAZ TITANIO HI SIRONA 20 N.cm PLATAFORMA S.I.N. BIBLIOTECA SIRONA IHI 3804 FX 3.8 - FX 4.5 * Compatible con SW HI  INTERFAZ CROMO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHC 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHC 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0  INTERFAZ TITANIO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHI 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHI 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0
TORNILLOS	 TORNILLO DE RETENCIÓN 20 N.cm CÓD. PTQH 18 Titanio Rosca de 1,8 mm	 TORNILLO DE RETENCIÓN 20 N.cm CÓD. PTQH 18 Titanio Rosca de 1,8 mm
LABORATORIALES	 TORNILLO DE LABORATORIO 20 N.cm CÓD. PLHIS1 PTMAS 24-1 Rosca de 1,8 mm	NO APLICA

TIPOS DE PRÓTESIS	SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE	
	ATORNILLADA	
	Unitaria	
CICATRIZADORES	ANALÓGICO	DIGITAL
	 CICATRIZADOR 10 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) CIS 3842 4,0 2,0 CIS 3844 4,0 4,0 CIS 3846 4,0 6,0 CIS 4552 5,0 2,0 CIS 4554 5,0 4,0 CIS 4556 5,0 6,0	 CICATRIZADOR DE PEEK 10 N.cm CÓD. DIÁM. PLAT (mm) DIÁM. PERFIL (mm) ALT. (mm) CPH 3805 3,8 5,0 5,0 CPH 3808 3,8 8,0 5,0 CPH 4508 4,5 8,0 5,0
INTERMEDARIO PROTÉSICO	NO APLICA	NO APLICA
TRANSFER	 TRANSFER DE CUBETA ABIERTA CÓD. DIÁM. (mm) TIHIS 38 3,8 TMAIS 45 4,5  TRANSFER DE CUBETA CERRADA CÓD. DIÁM. (mm) TIPI3 38 3,8 TMFI3 45 4,5	 JIG DE ESCANEO - HI CÓD. JBHI 38C  JIG DE ESCANEO - HI CÓD. JBHI 38
PROVISIONALIZACIÓN	 INTERFAZ TITANIO HI SIRONA 20 N.cm PLATAFORMA S.I.N. BIBLIOTECA SIRONA IHI 3804 FX 3.8 - FX 4.5 * Compatible con SW HI  INTERFAZ CROMO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHC 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHC 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0  INTERFAZ TITANIO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHI 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHI 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0	 CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO 20 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) CPTS 386-Q 3,8 CPTS 456-Q 4,5
CONFECCIÓN DE MODELO	 ANÁLOGO CÓD. ANS 3800 ANS 4500	 ANÁLOGO DIGITAL - HI CÓD. ADHI 38
PRÓTESIS FINAL	 PILAR EUCLA CRCO 20 N.cm CÓD. EUCLAS 386-Q EUCLAS 456-Q  PILAR UCLA PLÁSTICO 20 N.cm CÓD. UCLAS 386-Q UCLAS 380-Q UCLAS 456-Q UCLAS 450-Q	 INTERFAZ TITANIO HI SIRONA 20 N.cm PLATAFORMA S.I.N. BIBLIOTECA SIRONA IHI 3804 FX 3.8 - FX 4.5 * Compatible con SW HI  INTERFAZ CROMO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHC 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHC 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0  INTERFAZ TITANIO HI 20 N.cm CÓD. DESCRIPCIÓN PLAT (mm) ALT. (mm) IHI 3804 Ø3.8X4 3,8 4,0 IHI 3806 Ø3.8X6 3,8 6,0
TORNILLOS	 TORNILLO DE RETENCIÓN 20 N.cm CÓD. PTQH 18 Titanio Rosca de 1,8 mm	 TORNILLO DE RETENCIÓN 10 N.cm CÓD. PRH 30 Titanio Rosca de 1,8 mm
LABORATORIALES	 TORNILLO DE LABORATORIO 20 N.cm CÓD. PLHIS1 PTMAS 24-1 Rosca de 1,8 mm	NO APLICA

TIPOS DE PRÓTESIS	MINI PILAR	
	ATORNILLADA	
	Parciales o totales	
CICATRIZADORES	ANALÓGICO	DIGITAL
	 PROTECTOR DE PILAR 10 N.cm CÓD. PMA 4855	
INTERMEDARIO PROTÉSICO	 MINI PILAR 20 N.cm CÓD. PLAT (mm) ALT. (mm) DIÁM. (mm) MAS 3801 3,8 1,0 4,8 MAS 3802 3,8 2,0 4,8 MAS 3803 3,8 3,0 4,8 MAS 3804 3,8 4,0 4,8 MAS 4501 4,5 1,0 4,8 MAS 4502 4,5 2,0 4,8 MAS 4503 4,5 3,0 4,8 MAS 4504 4,5 4,0 4,8	
TRANSFER	 TRANSFER DE CUBETA ABIERTA CÓD. TMAH 4800  TRANSFER DE CUBETA CERRADA CÓD. TMFA 4800	 JIG DE ESCANEO MINI PILAR CÓD. JBMA  JIG DE ESCANEO MINI PILAR CÓD. JBMAC
PROVISIONALIZACIÓN	 CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO 10 N.cm CÓD. PTM 4800-3 PTMAS 4800-3 Indicado para soldadura por láser	 INTERFAZ TITANIO MINI PILAR 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IMAT 04 4,0 IMAT 06 6,0  INTERFAZ CROMO MINI PILAR 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IMAC 04 4,0 IMAC 06 6,0
CONFECCIÓN DE MODELO	 ANÁLOGO CÓD. ANMA 4800	 ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR CÓD. ADMA
PRÓTESIS FINAL	 INTERFAZ TITANIO MINI PILAR 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IMAT 04 4,0 IMAT 06 6,0  CILINDRO CALCINABLE Y CrCo 10 N.cm CÓD. PLAT. (mm) CPM 4800-3 Plástico CLEM 4800-3 Cromo-cobalto  INTERFAZ CROMO MINI PILAR 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IMAC 04 4,0 IMAC 06 6,0	 INTERFAZ TITANIO PILAR CÓNICO 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IACT 0400 4,0 IACT 0406 4,0 IACT 0600 6,0 IACT 0606 6,0  INTERFAZ CROMO PILAR CÓNICO 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IACC 0400 4,0 IACC 0406 4,0 IACC 0600 6,0 IACC 0606 6,0
TORNILLOS	 TORNILLO DE RETENCIÓN 10 N.cm CÓD. PRH 30 Titanio ALT. (mm) 3,0	 TORNILLO DE RETENCIÓN 10 N.cm CÓD. PRH 30 Titanio ALT. (mm) 3,0
LABORATORIALES	 PROTECTOR DE PULIDO CÓD. PPM 01  TORNILLO DE LABORATORIO CÓD. PL 1405 Corto PTMA 13-1 Largo DIÁM. (mm) 1,4 1,4	NO APLICA

TIPOS DE PRÓTESIS	PILAR CÓNICO	
	ATORNILLADA	
	Unitaria, parciales o totales	
CICATRIZADORES	ANALÓGICO	DIGITAL
	 PROTECTOR DE PILAR 10 N.cm CÓD.	
INTERMEDARIO PROTÉSICO	 PILAR CÓNICO HI 20 N.cm CÓD. PLAT (mm) ALT. (mm) DIÁM. (mm) ACS 3801 3,8 1,0 4,8 ACS 3802 3,8 2,0 4,8 ACS 3803 3,8 3,0 4,8 ACS 3804 3,8 4,0 4,8 ACS 4501 4,5 1,0 4,8 ACS 4502 4,5 2,0 4,8 ACS 4503 4,5 3,0 4,8 ACS 4504 4,5 4,0 4,8	
TRANSFER	 TRANSFER DE CUBETA ABIERTA CÓD. TMAA 4800 TMAA 4806  TRANSFER DE CUBETA ABIERTA CÓD. TMFA 4800 TMFA 4806	 JIG DE ESCANEO PILAR CÓNICO CÓD. JBAC 00 JBAC 06  JIG DE ESCANEO PILAR CÓNICO CÓD. JBAC 00C JBAC 06C
PROVISIONALIZACIÓN	 CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO 10 N.cm CÓD. PTA 4800-3 PTA 4806-3	 INTERFAZ TITANIO PILAR CÓNICO 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IACT 0400 4,0 IACT 0406 4,0 IACT 0600 6,0 IACT 0606 6,0  INTERFAZ CROMO PILAR CÓNICO 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IACC 0400 4,0 IACC 0406 4,0 IACC 0600 6,0 IACC 0606 6,0
CONFECCIÓN DE MODELO	 ANÁLOGO CÓD. ANAC	 ANÁLOGO DIGITAL - PILAR CÓNICO CÓD. ADAC
PRÓTESIS FINAL	 CILINDRO CALCINABLE Y CrCo 10 N.cm CÓD. CPAC 00-3 Plástico CALE 00-3 Cromo-cobalto CPAC 06-3 Plástico CALE 06-3 Cromo-cobalto  INTERFAZ TITANIO PILAR CÓNICO 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IACT 0400 4,0 IACT 0406 4,0 IACT 0600 6,0 IACT 0606 6,0  INTERFAZ CROMO PILAR CÓNICO 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IACC 0400 4,0 IACC 0406 4,0 IACC 0600 6,0 IACC 0606 6,0	
TORNILLOS	 TORNILLO DE RETENCIÓN 10 N.cm CÓD. PRH 30 Titanio ALT. (mm) 3,0	
LABORATORIALES	 PROTECTOR DE PULIDO CÓD. PPAC 01  TORNILLO DE LABORATORIO CÓD. PL 1405 Corto PTMA 13-1 Largo DIÁM. (mm) 1,4 1,4	NO APLICA